

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0
Τ.Κ. 63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Τηλ.: +30 6978047815, e-mail: averis.stelios@gmail.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΑ-3



Η εξεταστική κλίνη προορίζεται για την υποβοήθηση της θέσης το σώματος ή των μελών του ασθενούς κατά την εξέταση του από το αρμόδιο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:



- Ποτέ μην υπερφορτώνετε την επιφάνεια της κλίνης (έως 140kg ανθρώπινο βάρος)
- Μην χρησιμοποιείτε την κλίνη για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στην επιφάνεια της κλίνης

Η μη τήρηση των ανωτέρω μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε ανθρώπους, ζημιά ή βλάβη στον σκελετό και στη βάση του, ή ακόμη και ανατροπή - πτώση του προϊόντος.

Περιοδικά, ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος και παρατηρήστε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν βεβαιωθείτε ότι:

- Η εξεταστική κλίνη βρίσκεται σε σταθερή και επίπεδη θέση πάνω στο δάπεδο.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0,
Τ.Κ.:63073, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
Τηλ.: +0306978047815, URL: www.averis.gr,
e-mail: averis.stelios@gmail.com



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0
Τ.Κ. 63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Τηλ.: +30 6978047815, e-mail: averis.stelios@gmail.com

- Για τη κατάκλιση του ασθενούς επί της κλίνης χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα βοηθήματα (σκαλοπάτια υποβοήθησης κλπ)

Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σε τακτική βάση και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά ή φθορά στις επιφάνειές του. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται τα κατάλληλα καθαριστικά και μέσα καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τα κάτωθι μέσα, εργαλεία και καθαριστικά υγρά για τον καθαρισμό των μεταλλικών μερών και επιφανειών του προϊόντος:

- ξύστρες ή παρόμοια αιχμηρά αντικείμενα
- συρματόβουρτσες
- μεταλλικές βούρτσες
- λευκαντικά ή οποιοδήποτε υγρό περιέχει χλωρίνη
- υδροχλωρικό οξύ

Να χρησιμοποιείτε τα κάτωθι υγρά καθαριστικά και μέσα για τον καθαρισμό:

- καθαρό, μαλακό πανί χωρίς χνούδι
- αποσταγμένο νερό
- αποσταγμένο νερό με ήπιο απορρυπαντικό

Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί και εγκεκριμένο καθαριστικό υγρό σκουπίστε όλες τις επιφάνειες του προϊόντος.

Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί να στεγνώσετε τις επιφάνειες του προϊόντος ή χρησιμοποιήστε στέγνωμα με ξηρό αέρα αν είναι εφικτό.

Περιοδικά, ελέγξτε την κλίνη και την βάση της και παρατηρήστε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης, ως κάτωθι:

- σπασμένα ή φθαρμένα πέλματα
- χαλαρά σημεία ενώσεων του σκελετού
- αστάθεια ή παραμόρφωση του προϊόντος (εξαιτίας υπερφόρτωσης ή άλλου λόγου)

Σε αυτή την περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν αλλά επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0,
Τ.Κ.:63073, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
Τηλ.: +0306978047815, URL: www.averis.gr,
e-mail: averis.stelios@gmail.com



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0
Τ.Κ. 63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Τηλ.: +30 6978047815, e-mail: averis.stelios@gmail.com

Διαδικασία συναρμολόγησης:

Τοποθετήστε το κρεβάτι σε μία λεία και καθαρή επιφάνεια με τον σκελετό προς τα πάνω. Πιέστε τα πόδια με τα χέρια στις υποδοχές των ποδιών του σκελετού. Γυρίστε το κρεβάτι σε όρθια στάση και αφαιρέστε την δέστρα από τον μηχανισμό της πλάτης. Τέλος, τοποθετήστε τους 2 γάντζους στις τρύπες όπου υπάρχουν στον σκελετό, είτε από την μεριά του κεφαλιού είτε από των ποδιών, για να μπορεί να κρεμαστεί η βέργα με το χαρτοσέντονο όπως στις παρακάτω εικόνες.



Η Επιχείρηση ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενο τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από μη σωστή χρήση του προϊόντος, αμέλεια ή κατάχρηση καθώς και από οποιαδήποτε επέμβαση, μετατροπή ή επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΑΓΡ. ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0,
Τ.Κ.:63073, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
Τηλ.: +0306978047815, URL: www.averis.gr,
e-mail: averis.stelios@gmail.com

